




System Kompakt CL

## Rufkompaktset für Behinderten WC

# Rufkompaktset für Behinderten WC, System Kompakt CL

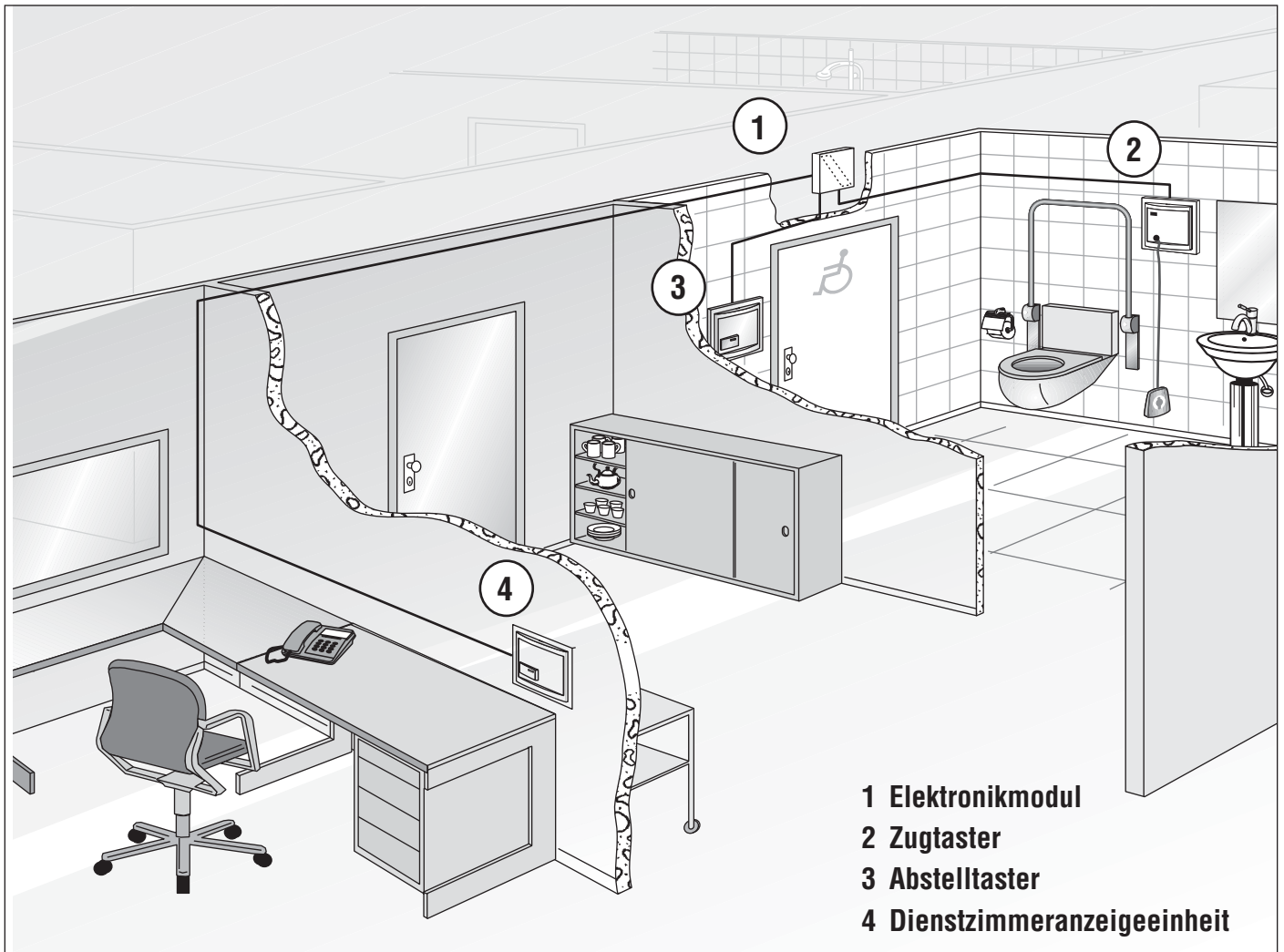

Anwendungsbeispiel: Rufkompaktset in einem Behinderten-WC (mit Ergänzungszubehör)

## Allgemeines

Um behinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, in öffentlichen Gebäuden auf dem WC Hilfe herbeizurufen, muss in diesen Räumen eine Rufauslösemöglichkeit installiert sein. Ein ausgelöster Ruf wird zum Beispiel dem Pförtner oder Mitarbeitern der Zentrale in diesem Gebäude optisch und akustisch signalisiert. Somit ist eine Unterstützung hilfebedürftiger Menschen gewährleistet. Das Rufkompaktset ist die ideale Lösung für diesen Anwendungsfall.


Als Komplettsystem mit Zugtaster, Abstelleinheit und Steuerelektronik, sowie einem Netzteil für die Stromversorgung sind diese Komponenten genau aufeinander abgestimmt. Die Installation des Rufkompaktsets ist sehr einfach und kann schnell durchgeführt werden.

## Hinweis:

**Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset mit der Artikelnummer 76910C1 nicht erweiterbar!**

## Funktionsbeschreibung

Ein vom Behinderten mittels Zugtaster ausgelöster Ruf wird durch Aufleuchten der integrierten Beruhigungslampe quittiert und an der außerhalb des WC's angeordneten Zimmersignalleuchte angezeigt. Die in der Zentrale oder in einem Aufenthaltsraum installierte Dienstzimmereinheit signalisiert dem zuständigen Personal den Ruf optisch durch Aufleuchten einer roten Kontrolllampe und akustisch durch einen Summton. Der Ruf kann mittels eines integrierten, potentialfreien Relaiskontaktes in ein Gebäude-/Gefahrenmeldesystem eingekoppelt werden. Der ausgelöste Ruf kann an der Dienstzimmereinheit quittiert werden, d.h. die akustische Meldung wird zeitweise unterdrückt. Erst im WC wird durch Betätigen der Abstelltasche der Ruf zurückgesetzt.

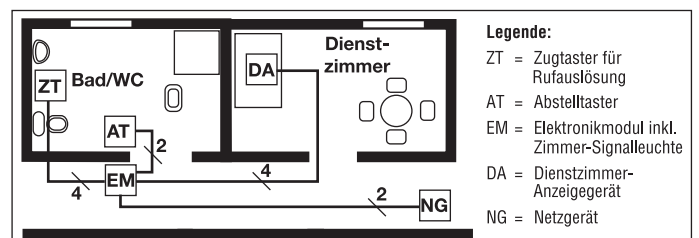

### Legende:

- ZT = Zugtaster für Rufauslösung
- AT = Abstelltaster
- EM = Elektronikmodul inkl. Zimmer-Signalleuchte
- DA = Dienstzimmer-Anzeigergerät
- NG = Netzgerät



## Produktbeschreibung

Artikelnummer

### Rufkompaktset für Behinderten WC

76910D1

Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:

- 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
- 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und grüner LED-Erinnerungslampe inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit roter LED-Kontrolllampe, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
- 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
- 1 Einphasen-Sicherheitsnetzgerät mit Sicherung für Niederspannungsversorgung der Anlage

## Technische Daten

### Zugtaster

Material	ABS
Befestigung	in UP-Dose, DIN 49073
Schutzklasse	IP 40 im eingebautem Zustand mit zugehöriger Abdeckplatte für Ruhestromanlagen
Ausführung	für Ruhestromanlagen
Abmessungen (B x H)	71 x 71 mm

### Abstelltaster

Befestigung	in UP-Dose, DIN 49073
Schutzklasse	IP 40 im eingebautem Zustand mit zugehöriger Abdeckplatte
Abmessungen (B x H)	71 x 71 mm

### Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

Befestigung	in UP-Dose, DIN 49073
Schutzklasse	IP 40 im eingebautem Zustand mit zugehöriger Abdeckplatte
Abmessungen (B x H)	71 x 71 mm

### Elektronikmodul mit integrierter, roter LED-Leuchte

Befestigung	UP-Montage
Farbe Abdeckplatte	weiß, RAL 9016
Farbe Leuchtfeld	rot
Schutzklasse	IP 40
Abmessungen (B x H x T)	71 x 71 x 10 mm

### Einphasen-Sicherheitsnetzgerät

Netzspannung	230 V AC
Ausgangsspannung	24 V DC
Nennstrom	0,5 A
Befestigung	AP-Montage
Abmessungen (B x H x T)	86 x 41 x 22 mm

**Novar GmbH a Honeywell Company**

Dieselstraße 2, D-41469 Neuss  
Telefon: +49 2137 17-0 (Verwaltung)  
Telefon: +49 2137 17-600 (Kundenbetreuungscenter)  
Telefax: +49 2137 17-286

**Honeywell Life Safety Austria GmbH**

Lemböckgasse 49, A-1230 Wien  
Telefon: +43 1 600 6030  
Telefax: +43 1 600 6030-900

**Internet:**  
[www.ackermann-clino.de](http://www.ackermann-clino.de)

**E-mail:**  
[info@ackermann-clino.de](mailto:info@ackermann-clino.de)

[www.hls-austria.at](http://www.hls-austria.at)

[hls-austria@honeywell.com](mailto:hls-austria@honeywell.com)

  
by Honeywell